

## PLUSCUR® Absorb – Hoch saugfähige Wundauflage

### Zweckbestimmung

Die PLUSCUR® Absorb Wundauflage ist für die Versorgung mäßig bis stark exsudierender Wunden bestimmt, einschließlich: Beingeschwüre, Dekubitus, diabetische Fußgeschwüre und chirurgische Wunden.

### Beschreibung

Die PLUSCUR® Absorb Wundauflage ist steril und besitzt einen dreilagigen Aufbau mit einer luftdurchlässigen, wasserdichten Vliesschicht, einem hoch saugfähigen Pad sowie einer Vliesschicht zur Feuchtigkeitsregulierung. Sie schafft eine optimale Wundfeuchte, unterstützt die Wundheilung und fördert einen schnellen Wundverschluss. Sie bindet zuverlässig Exsudat, minimiert das Risiko einer Mazeration und schont die umliegende Haut.

### Indikationen

Die PLUSCUR® Absorb Wundauflage ist für die Versorgung mäßig bis stark exsudierender Wunden bestimmt, einschließlich:

- Beingeschwüre,
- Dekubitus,
- diabetische Fußgeschwüre und
- chirurgische Wunden.

### Anwendungshinweise

1. Nachdem die Wunde gereinigt und desinfiziert wurde, wählen Sie eine passend große Wundauflage aus, die ausreichend Platz zum Wundrand bietet.
2. Die hoch saugfähige PLUSCUR® Absorb Wundauflage kann entweder als Primärverband oder als sekundäre Wundauflage verwendet werden. Wenn sie als Primärverband genutzt wird, muss die hoch saugfähige PLUSCUR® Absorb Wundauflage in direkten Kontakt zum Wundgrund gebracht werden, um sicherzustellen, dass die Wundflüssigkeit absorbiert wird. Anschließend die Auflage mit Bandage, Strumpf, Pflaster oder Verband fixieren.
3. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Menge des Exsudats ab.
4. Die Entfernung der PLUSCUR® Absorb Wundauflage wird erleichtert, wenn sie zuvor mit Kochsalzlösung durchfeuchtet wird.
5. Die Entsorgung kann über den gewöhnlichen Restmüll erfolgen. Bei Kontamination müssen die geltenden lokalen Bestimmungen befolgt werden.

### Kontraindikationen

Das Produkt darf nicht angewendet werden bei:

- trockenen oder nur geringfügig exsudierenden Wunden
- Augen
- Schleimhäuten
- in Wundhöhlen, da die PLUSCUR® Absorb Wundauflage bei der Flüssigkeitsaufnahme anschwillt
- Verbrennungen dritten Grades
- Allergie oder Überempfindlichkeit gegen die Wundauflage oder deren Bestandteile

### Warnhinweise

1. Nicht wiederverwenden. Das Produkt ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Sehen Sie von der Verwendung der PLUSCUR® Absorb Wundauflage ab, wenn die sterile Verpackung beschädigt oder bereits geöffnet ist.
2. Die PLUSCUR® Absorb Wundauflage nicht zurechtschneiden, die Abdeckung muss unversehrt bleiben.

### Aufbewahrung
















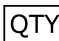

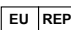



Bitte bewahren Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort und geschützt vor direkter Lichteinstrahlung auf. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 3 Jahre ab Herstellungsdatum.

# PLUSCUR® Absorb – Hoch saugfähige Wundauflage

## Produktspezifikationen

Produktname – Produktgruppe	Artikelnummer	Größen
PLUSCUR® Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1010	125x125 (100x100) mm
PLUSCUR® Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1020	125x230 (100x200) mm
PLUSCUR® Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1727	200x300 (170x270) mm
PLUSCUR® Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1737	200x400 (170x370) mm

## Erklärung der auf dem Etikett verwendeten Grafiken, Symbole und Abkürzungen

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Nicht wiederverwenden		Chargenbezeichnung
	Gebrauchsanweisung beachten		Verwendbar bis
	Nicht wiederverwenden, wenn Verpackung beschädigt ist, und die Gebrauchsanweisung beachten		Artikelnummer
	Sterilisiert mit Ethylenoxid		CE-Kennzeichen mit Kennnummer der benannten Stelle
	Temperaturgrenzwerte		Trocken aufbewahren
	Hersteller		Medizinprodukt
	Herstellungsdatum		Einfaches Sterilbarriersystem
	Vor Sonnenlicht schützen		Anzahl/ Stück
	Importeur		Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Eindeutige Produktidentifizierung		Nicht erneut sterilisieren
	Achtung		

**Hersteller:** Huizhou Foryou Medical Devices Co, Ltd.  
North Shangxia Rd., Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, HuiZhou,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**EU REP:** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

**Importeur:** For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Am Studio 16, 12489 Berlin, Germany, [www.forlife.info](http://www.forlife.info)