

## LIVSANE Puls-Oximeter

PZN: 17540930

<b>Kategorie:</b>	Medizinprodukte
<b>Darreichungsform:</b>	Puls-Oximeter
<b>Menge:</b>	1 Stück
<b>Produkteigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gleichzeitige Messung der Hämoglobinsättigung (SpO<sub>2</sub>), der Pulsfrequenz und des Perfusionsindex mit kontinuierlichem Plethysmogramm</li> <li>• ODI<sub>4</sub> Messung (Sauerstoffsättigungsindex von 4 %)</li> <li>• zweifarbiges OLED-Display mit großer Schrift und 6 Anzeigemodi</li> <li>• Anti-Rüttel Funktion</li> <li>• IP 22 Wasserschutz</li> <li>• geringe Perfusion: 0,3 % (mit fortschrittlichem DSP-Algorithmus zur Verbesserung der Messgenauigkeit bei geringer Perfusion)</li> <li>• visuelle und akustische Erinnerungsfunktion</li> <li>• Echtzeit-Spot-Checks</li> <li>• automatisches Ausschalten</li> <li>• Anzeige für niedrigen Batteriestatus</li> <li>• inkl. Schutzhülle und Batterien</li> <li>• Medizinprodukt</li> <li>• 2 Jahre Garantie</li> <li>• für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene geeignet</li> </ul>
<b>Anwendung:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stecken Sie einen Ihrer Finger mit der Nageloberfläche nach oben so weit wie möglich in das Oximeter und lösen Sie dann die Klemme.</li> <li>2. Drücken Sie die ON-Taste und das Oximeter schaltet sich ein.</li> <li>3. Lesen Sie das Messergebnis vom Anzeigebildschirm nach einigen Sekunden ab.</li> </ol> <p>Weitere Informationen zu den Einstellungen entnehmen Sie bitte der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanleitung.</p>
<b>Aufbewahrungshinweis:</b>	Das Puls-Oximeter sollte bei einer Temperatur zwischen -25 und 55 °C sowie einer Luftfeuchtigkeit von ≤ 95 % RH aufbewahrt werden.
<b>Verantwortliches Unternehmen:</b>	<p>Shenzhen AOJ Medical Technology Co., Ltd.,  Room 301 &amp; 4F, Block A, Building A,  Jingfa Intelligent Manufacturing Park,  Xiaweiyuan, Gushu Community,  Xixiang Street, Bao'an District,  518126 Shenzhen, China.</p> <p><b>Vertrieb EU:</b>  PXG Pharma GmbH,  Pfungstweidstrasse, 10-12,  68199 Mannheim,  Deutschland.</p>