



OROXID® sensitiv Mundlösung 250 ml

Mundspüllösung für die tägliche Mundpflege und gesundes Zahnfleisch:

- bei empfindlicher Mundschleimhaut,
- für Erwachsene und Kinder,
- bei Entzündungen,
- bei Zahnsparungen und Prothesen,
- bei Implantaten,
- für die tägliche, langfristige Anwendung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

OROXID® sensitiv Mundlösung 250 ml

MEDIZINPRODUKT

- OHNE ALKOHOL
- OHNE CHLORHEXIDIN

OROXID® sensitiv Mundlösung 250 ml ist ein innovatives medizinisches Hilfsmittel auf der Basis von **aktiven Sauerstoffverbindungen**. Dabei handelt es sich um einen **innovativen Wirkmechanismus**, der die Mundhöhle **oxygeniert, regeneriert** und **desinfiziert**.

Anwendung der Mundlösung:

- zur täglichen **Mundpflege**,
- für nachhaltig **gesundes Zahnfleisch** und
- zur unterstützenden Behandlung von **Entzündungen im Mund- und Rachenraum**.

Geeignet auch für Menschen, die zu Entzündungen im Mund neigen, u. a.:

- **Raucher**,
- **Diabetiker**,
- **Menschen mit geschwächtem Immunsystem...**

OROXID® sensitiv Mundlösung ist eine wirksame ergänzende Mundpflege bei:

- **festen Zahnsparungen**,
- **Teilprothesen**,
- **feststehendem Zahnersatz** (Kronen, Brücken),
- **Zahnimplantaten** und
- **kieferorthopädischen Unregelmäßigkeiten**, da es genau dort effektiv wirkt, wo die normale Zahnpflege erschwert ist.

Optimale Prophylaxe gegen:

- **Zahnbelag/Zahnfärbungen,**
- **Mundgeruch,**
- **Geschwüre in der Mundschleimhaut** (Aphten),
- **Beläge auf Zunge** und Mundschleimhaut (Mundsoor), die meist auf eine Pilzinfektion zurückzuführen sind.

Aufgrund der mechanischer Eigenschaften und der Freisetzung von Sauerstoff in Form einer milden Schaumbildung wirken aktive Sauerstoffverbindungen auf die Mikroumgebung der beschädigten Schleimhaut. Dabei beschränkt sich deren Wirkung jedoch auf die Oberfläche, da sie nicht ins tiefere Gewebe eindringen.

EIGENSCHAFTEN:

- **Ohne Alkohol, Chlorhexidin und Natriumoxychlorid**
- **Frei von Nanopartikeln und ohne CMR** (krebserzeugende, erbgutverändernde, und fortpflanzungsgefährdende) **Stoffe**
- Neuer Wirkungsmechanismus (**oxygeniert, regeneriert, desinfiziert**)
- Für **Erwachsene und Kinder** ab 6 Jahren
- **Sichere** kurz- und langfristige Anwendung
- Für alle **Schleimhäute** geeignet (auch für empfindliche und verletzte)
- Nachgewiesene **Wirksamkeit** (Vorbeugung, Pflege und Behandlung)
- **Einfache** und **praktische** Anwendung

ANWENDUNG

OROXID® sensitiv Mundlösung 250 ml mit folgender Dosierungsempfehlung: Anwendung bei Entzündungen 2-3-mal täglich bzw. zur Vorbeugung bzw. zur regelmäßigen Mundpflege 1-2-mal täglich (am besten während oder nach dem Zähneputzen). Dabei ca. 10 ml Flüssigkeit (Inhalt von 2 Deckelfüllungen) in ein Glas geben, 30 Sekunden den Mund damit spülen und ausspucken. Ein anschließendes Ausspülen mit Wasser ist nicht erforderlich.

Sobald **OROXID® sensitiv Mundlösung** mit der Schleimhaut in Berührung kommt, wird aktiver Sauerstoff in Form von winzigen Bläschen freigesetzt, was man als leichtes Schäumen im Mund spüren kann. Aufgrund der mechanischen Eigenschaften und der Freisetzung von Sauerstoff wirkt das Produkt auf die Mikroumgebung der beschädigten Schleimhaut.

OROXID® sensitiv Mundlösung eignet sich für die **langfristige Anwendung** sowie für Menschen mit **empfindlicher Schleimhaut**.

ZUSAMMENSETZUNG

OROXID® sensitiv Mundlösung 250 ml enthält deionisiertes Wasser, Wasserstoffperoxidlösung (1,5 %), die durch ein spezielles technologisches Verfahren gewonnen wird, Actipone® PX3 (Kräuterkombination aus Echinacea, Myrte und Ingwer), Aromastoffe und Stabilisator.

OROXID® ist ohne Alkohol, Chlorhexidin und Natriumoxychlorid, weshalb es sich auch für die langfristige Anwendung eignet und die Mundschleimhaut nicht austrocknet.

OROXID® ist frei von Nanopartikeln und ohne CMR (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende) Stoffe.

VORSICHTSMASSNAHMEN und HINWEISE

Die Anwendung von **OROXID® sensitiv Mundlösung 250 ml** ist unbedenklich. Durch die Anwendung wird kein hartes oder weiches Gewebe im Mund verletzt und es besteht auch kein erhöhtes Risiko für langfristige unerwünschte Nebenwirkungen. **OROXID® sensitiv** eignet sich zum Gurgeln und zur lokalen Anwendung im Mund- und Rachenraum. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und wird nach der Anwendung ausgespuckt. Sollte bei der Anwendung von **OROXID® sensitiv Mundlösung 250 ml** ein Gefühl der Reizung auftreten, dann hält dieses in der Regel nur vorübergehend an und klingt nach einigen Minuten oder nach dem Ausspülen mit Wasser wieder ab. Bei bereits vorhandenen Geschwüren im Mund- und Rachenraum kann ebenfalls ein Reizgefühl auftreten. Sollte das Reizgefühl länger als fünf Tage anhalten, empfehlen wir die Rücksprache mit dem Zahnarzt. Sauerstoffverbindungen bis 3% untersucht wurde, haben auch nach einer langfristigen Anwendung (von bis zu sechs Jahren) eine sichere Anwendung ergeben.